

Ein vollständiges Handbuch ist unter www.medx5.com verfügbar

Installationsmaterialien:



Unterlagscheiben (4x)

M8 Muttern (4x)

Nylon-Abstandshalter (4x)

10 mm Wanddübel (4x)


Gewindestangen (4x)

Geeignet für die Installation auf Ziegelstein/Beton oder Holz


WICHTIG:

- Installation auf einer ebenen Oberfläche
- Verwenden Sie immer die Distanzscheibe
- Empfohlene Höhe: 1,5 - 1,6 m für die oberen Löcher (über dem Boden)
- Im Schatten installieren
- Adapter im Haus platzieren

Installation

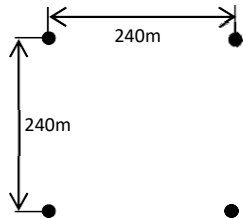

- 1: 10mm-Löcher bohren (4x)
- 2: Dübel und Gewindestangen verwenden (20 mm vorstehend)
- 3: Abstandshalter platzieren
- 4: Stromkabel: Bohren Sie ein 12-mm-Loch durch die Wand

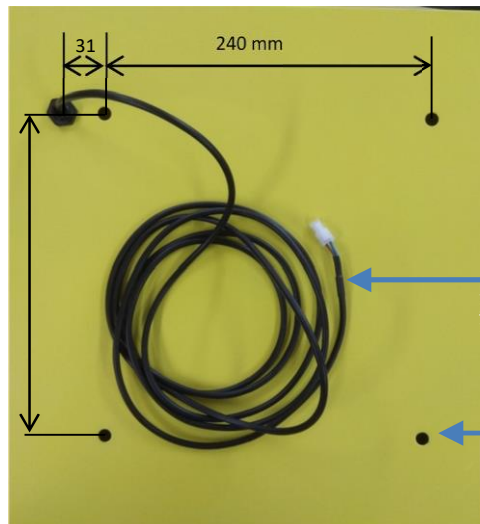

5: Unterlegscheiben und M8-Muttern auf der Innenseite platzieren

